


Anleitung zur Anbringung der Eakin®-Drainagebeutel

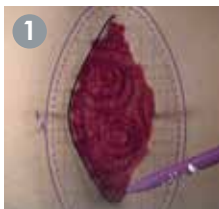

1
Jedem Eakin®-Drainagebeutel liegt eine Schablone bei. Einfach die Wundform durchzeichnen und ausschneiden.



2
Die Zeichnung spiegelverkehrt auf den Cohesive®-Hautschutz übertragen.




3
Wundform als Öffnung aus dem Cohesive®-Hautschutz ausschneiden und Schutzpapier abziehen.



4
Narben, Falten oder kleine Unebenheiten lassen sich mit der Eakin-Cohesive®-Paste ausgleichen.



5
Ggf. mit modellierbaren Eakin-Cohesive®-Hautschutzplatten oder -ringen die Wundumgebung vorbehandeln.

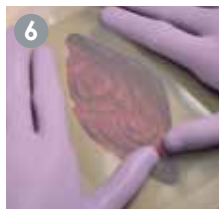

6
Eakin®-Drainagebeutel auf der Wunde ausrichten und anmodellieren. Gegebenenfalls Ableitungssystem befestigen.




Anwendungsvideo unter www.eakin.de/anwendungsvideos

Eakin® selbstklebende Behandlungsfenster in zwei Größen


Eakin®-Behandlungsfenster ermöglichen einen individuellen Zugang zur Wunde für Inspektion, Verbandswechsel oder zum Spülen, ohne dass der gesamte Drainagebeutel abgenommen werden muss. Sie lassen sich so oft wie notwendig öffnen und wieder schließen.



Einfache Handhabung:

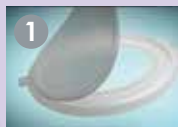

1
Fenster öffnen oder optional Deckel abnehmen/ aushängen.

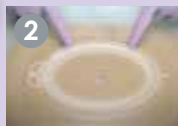

2
Fensterrahmen auf Außenfolie kleben und gut andrücken.



3
Zugang zum Drainagebeutel an der Außenfolie ausschneiden und Deckel schließen.
















Praxistipp:



Zusätzliche Gürtelbefestigung am Fenster möglich

Fistel- und Wunddrainage in 15 Größen und Varianten

Ausschneidbar bis:

	Mit Ablaufventil	Mit Faltverschluss („Fold & Tuck“)
Höhe x Breite in mm: 45 x 30	 Beutel klein Packungsinhalt: 10 Beutelvolumen: 110 ml Artikel-Nr.: 839260 PZN: 05493214	 Beutel klein Packungsinhalt: 10 Beutelvolumen: 110 ml Artikel-Nr.: 839250 PZN: 05493160
86 x 60	 Beutel mittelgroß Packungsinhalt: 10 Beutelvolumen: 145 ml Artikel-Nr.: 839267 PZN: 09080325	
110 x 75	 Beutel medium Packungsinhalt: 10 Beutelvolumen: 520 ml Artikel-Nr.: 839261 PZN: 05493220	 Beutel medium Packungsinhalt: 10 Beutelvolumen: 520 ml Artikel-Nr.: 839251 PZN: 05493177
175 x 110	 Beutel groß Packungsinhalt: 10 Beutelvolumen: 900 ml Artikel-Nr.: 839262 PZN: 05493237	 Beutel groß Packungsinhalt: 10 Beutelvolumen: 900 ml Artikel-Nr.: 839252 PZN: 05493183
160 x 245	 Beutel extragroß, horizontal mit integriertem Behandlungsfenster Packungsinhalt: 5 Beutelvolumen: 3300 ml Artikel-Nr.: 839264 , PZN: 05493266 (ohne Behandlungsfenster: Artikel-Nr.: 839263 , PZN: 05493243)	 Beutel extragroß Packungsinhalt: 5 Beutelvolumen: 3300 ml Artikel-Nr.: 839253 PZN: 05493208
245 x 160	 Beutel extragroß, vertikal mit integriertem Behandlungsfenster Packungsinhalt: 5 Beutelvolumen: 3300 ml Artikel-Nr.: 839268 , PZN: 9080319 (ohne Behandlungsfenster: Artikel-Nr.: 839265 , PZN: 05493272)	
250 x 80	 Beutel midi Packungsinhalt: 5 Beutelvolumen: 1100 ml Artikel-Nr.: 839270 PZN: 11527555	 Behandlungsfenster zur Verwendung mit Eakin® Wundbeuteln groß, Innendurchmesser 11 x 6 cm für alle Wundbeutel ab 839262, 839252 (außer 839270) Packungsinhalt: 5 Artikel-Nr.: 839280 PZN: 05493295
290 x 130	 Beutel extragroß Packungsinhalt: 5 Beutelvolumen: 1600 ml Artikel-Nr.: 839266 PZN: 05493289	 Behandlungsfenster zur Verwendung mit Eakin® Wundbeuteln klein, Innendurchmesser 5 cm für alle Wundbeutel ab 839261, 839251, 839270 Packungsinhalt: 5 Artikel-Nr.: 839281 PZN: 11527561
385 x 250	 Beutel maxi Packungsinhalt: 1 Beutelvolumen: 6600 ml Artikel-Nr.: 839269 PZN: 07019310	

Behandlungsfenster

Modellierbarer Eakin-Cohesive®-Haut- und Wundrandschutz (auch ergänzend z. B. zur VAC®-Versorgung)

	Eakin Cohesive® Hautschutzringe, 98 mm/19 mm (innen), groß Packungsinhalt: 10 Artikel-Nr.: 839001 PZN: 10280963		Eakin Cohesive® Hautschutzpaste, alkoholfrei, 60 g Packungsinhalt: 1 Artikel-Nr.: 839010 PZN: 05493131
	Eakin Cohesive® Hautschutzringe, 48 mm/19 mm (innen), klein Packungsinhalt: 30 Artikel-Nr.: 839002 PZN: 10280957		Eakin Protect™ Hautschutzspray, alkoholfrei, 50 ml Packungsinhalt: 1 Artikel-Nr.: 839026 PZN: 10770638
	Eakin Cohesive SLIMS® Hautschutzringe, 48 mm/19 mm (innen), dünn Packungsinhalt: 10 Artikel-Nr.: 839005 PZN: 10126966		Eakin Protect™ Hautschutztücher, alkoholfrei Packungsinhalt: 30 Artikel-Nr.: 839025 , PZN: 09709036
	Eakin Cohesive StomaWrap™ Hautschutzring, 85 mm, oval Packungsinhalt: 10 Artikel-Nr.: 839006 PZN: 10770621		Eakin Cohesive® Hautschutzplatten 10 x 10 cm / 10 x 20 cm Packungsinhalt: 5 Artikel-Nr.: 839004 / 839003 PZN: 05493154 / 05493148

Fragen, Muster, Bestellungen: 0800-22 440 22 (gebührenfrei)