

Einfaches Anbringen und Entfernen von Eakin® dot

Zum Anbringen



Ausklapp!en


Nach dem Anbringen der Basisplatte ziehen Sie mit Ihren Fingern den violetten Rastring heraus.



Anklick!en

Platzieren Sie den Beutel auf den violetten Rastring der Basisplatte und untergreifen Sie diesen, so können Sie den Beutel rundherum festdrücken. Dann hören Sie ein deutliches Klicken. Anschließend kann der Rastring versenkt werden.

Zum Entfernen

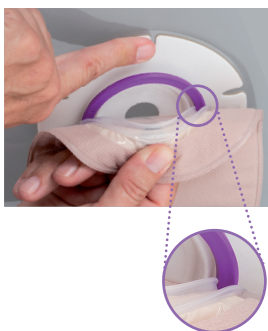

Wichtig: Beutel nach unten knick!en

bis der innere Sicherheitsring am Beutel sich etwas aus dem violetten Rastring hebt. Dann einfach nach unten abziehen.

Eakin®-dot-Videos unter:



www.youtube.com/watch?v=Ks5JUVeHy90
(Ausklappen)



www.youtube.com/watch?v=byYgCYsEPn0
(Anklicken)



www.youtube.com/watch?v=txXF9a778hQ
(Knicken)

So bestellen Sie Eakin® dot

Plane Basisplatten mit durchgehendem Hautschutz

Art.-Nr.	Eakin® dot Basisplatte	Rastring	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839800	ausschneidbar 15-37,5 mm	60 mm	5	29.26.05.1092	11870460
839801	vorgestanzt 20 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870477
839802	vorgestanzt 22,5 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870514
839803	vorgestanzt 25 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870520
839804	vorgestanzt 27,5 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870537
839805	vorgestanzt 30 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870566
839806	vorgestanzt 32,5 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870572
839807	vorgestanzt 35 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870595
839808	vorgestanzt 37,5 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870626
839809	ausschneidbar 15-50 mm	80 mm	5	29.26.05.1101	15529338
839810	vorgestanzt 40 mm	80 mm	5	29.26.05.1100	15529321
839811	vorgestanzt 45 mm	80 mm	5	29.26.05.1100	15529315
839812	vorgestanzt 50 mm	80 mm	5	29.26.05.1100	15529309

Kolostomiebeutel mit Filter und Gürtelhalterung

Art.-Nr.	Eakin® dot Kolostomiebeutelvolumen	Beutel- volumen	Rastring	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839900	Mini	250 ml	60 mm	30	29.26.01.0079	11870224
839901	Standard	440 ml	60 mm	30	29.26.01.0080	11870247
839902	Maxi	560 ml	60 mm	30	29.26.01.0078	11870282
839920	Standard	440 ml	80 mm	30	29.26.01.0084	15529290
839921	Maxi	560 ml	80 mm	30	29.26.01.0085	15529284

Ausstreifbeutel mit Filter und Gürtelhalterung

Art.-Nr.	Eakin® dot Ausstreifbeutel	Beutel- volumen	Rastring	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839903	Mini	330 ml	60 mm	30	29.26.02.0097	1187336
839904	Standard	410 ml	60 mm	30	29.26.02.0098	11870365
839905	Maxi	620 ml	60 mm	30	29.26.02.0096	11870394
839922	Standard	410 ml	80 mm	30	29.26.02.0103	15529278
839923	Maxi	620 ml	80 mm	30	29.26.02.0104	15529261

Eakin® Gürtel

Art.-Nr.	Eakin® Gürtel	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839520	stufenlos verstellbar, 50–160 cm	1	29.26.11.0024	05494426

Alle Beutel haben eine beidseitige angenehme hautfarbene Vliesumhüllung mit Sichtfenster. Die Beutelfolie darunter ist transparent.

Der schnelle Weg zu Ihrem Gratismuster online und mobil:

Ihr Eakin®-Musterportal

Einfach mobil unter

<https://professionals.eakin.de>

anfordern oder über diesen QR-Code:



Beratung:



0800-22 440 22

(gebührenfrei)

Bestellungen:



0800-22 440 221

(gebührenfrei)

Eakin GmbH, FeringasträÙe 6, 85774 Unterföhring

Tel. 089-99 216 256, Fax 0800-22 440 220, info@eakin.de, www.eakin.de