

Eakin Cohesive® Hautschutzplatten

Modellierbarer Hautschutz für Wundrand und Wundumgebung

- Anmodellierbar
- Haftet beidseitig
- Beliebig zuschneidbar
- Kombinierbar mit allen Wund- und Stomabeuteln
- Zum Abdichten einer V.A.C.®-Versorgung



Eakin Cohesive® Hautschutzplatten

Beschreibung	Packungsinhalt	Art.-Nr.	PZN	HMV
10x10cm	5	839004	05493154	29.26.07.0046
10x20cm	5	839003	05493148	29.26.07.1026

Günstige
Alternative zum
Hautschutzring:
10x10cm Cohesive®
Hautschutzplatten mit
Preisvorteil!

Quellen und weiterführende Literatur:

- 1) McGrogan, G.: Effects of a hydrocolloid ostomy seal on fecal enzyme activity and moisture absorption. Poster presented at 3rd Congress of the World Union of Wound Healing Societies June 4–8, 2008; Toronto, Canada.
- 2) „Effect of a long life ostomy seal on faecal enzyme activity“, Dr. Grace McGroggan, TG Eakin Ltd, Dr. Lorraine Martin, Queen's University Belfast, Northern Ireland (2014).
- 3) „Effect over seven days on fungal growth“, Dr. Grace McGroggan, TG Eakin Ltd, Northern Ireland (2012).
- 4) Mc Groggan G., Haughey S. und McDowell K. (2018): An absorbent, enzyme-inhibiting seal reduces peristomal skin complications. Gastrointestinal Nursing 16:1, 42-4.

Alle Informationen dieses Eakin-Folders beruhen auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für aktuell und korrekt gehalten werden. Eine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Art von Schäden, die sich aus der Nutzung der hier publizierten Informationen ergeben könnten. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine medizinische Beratung dar und ersetzen nicht die Beratung durch Ihren Hausarzt oder andere Gesundheitsfachkräfte. Diese Informationen stellen keine Handlungsanleitung bei einem medizinischen Notfall dar. Falls Sie in eine medizinische Notfallsituation geraten, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt. Sollten Sie sich für die Verwendung von in diesem Prospekt aufgeführten Medizinprodukten entscheiden, beachten Sie bitte vor deren Anwendung auch die jeweilige Gebrauchsinformation mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Eakin GmbH · FeringasträÙe 6, 85774 Unterföhring · Tel. 089-99 216 256, Fax 0800-22 440 220 · info@eakin.de, www.eakin.de

Beratung:

☎ **0800-22 440 22**
(gebührenfrei)

Bestellungen:

☎ **0800-22 440 221**
(gebührenfrei)

Ihr Eakin®-Musterportal

Einfach mobil unter
<https://professionals.eakin.de>
anfordern oder über diesen QR-Code:



Eakin Cohesive® Hautschutzplatten

Vielseitig &
kostengünstig



Das Problem:

Feuchtigkeit und aggressive Exsudate weichen die umgebende Haut auf (Mazeration) und beeinträchtigen so die Wundheilung.

+ Feuchtigkeit


Kommt die Haut über einen längeren Zeitraum hinweg mit Feuchtigkeit in Kontakt, wird das Stratum Corneum der Haut durchweicht, was zur Folge hat, dass das Gewebe geschwächt und die Barrierefunktion der Haut in Mitleidenschaft gezogen wird.¹⁾

+ Ausscheidungsenzyme

Proteasen und Lipasen der Ausscheidungen werden als Hauptfaktoren gesehen, die Hautirritationen verursachen.²⁾

+ Chemische und biologische Irritantien

Sowohl chemische als auch biologische Reizstoffe können zu einer Irritation der Haut verstärkend beitragen und zu sekundären Infektionen führen.³⁾

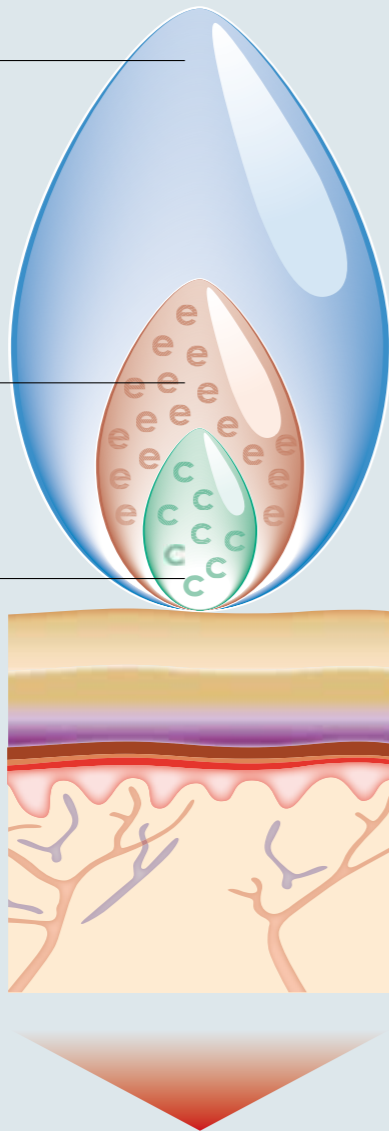

Mazeration


Irritation

Entzündung

Verzögerte Wundheilung

Die Lösung:

Eakin Cohesive®
modellierbare
Hautschutzplatten

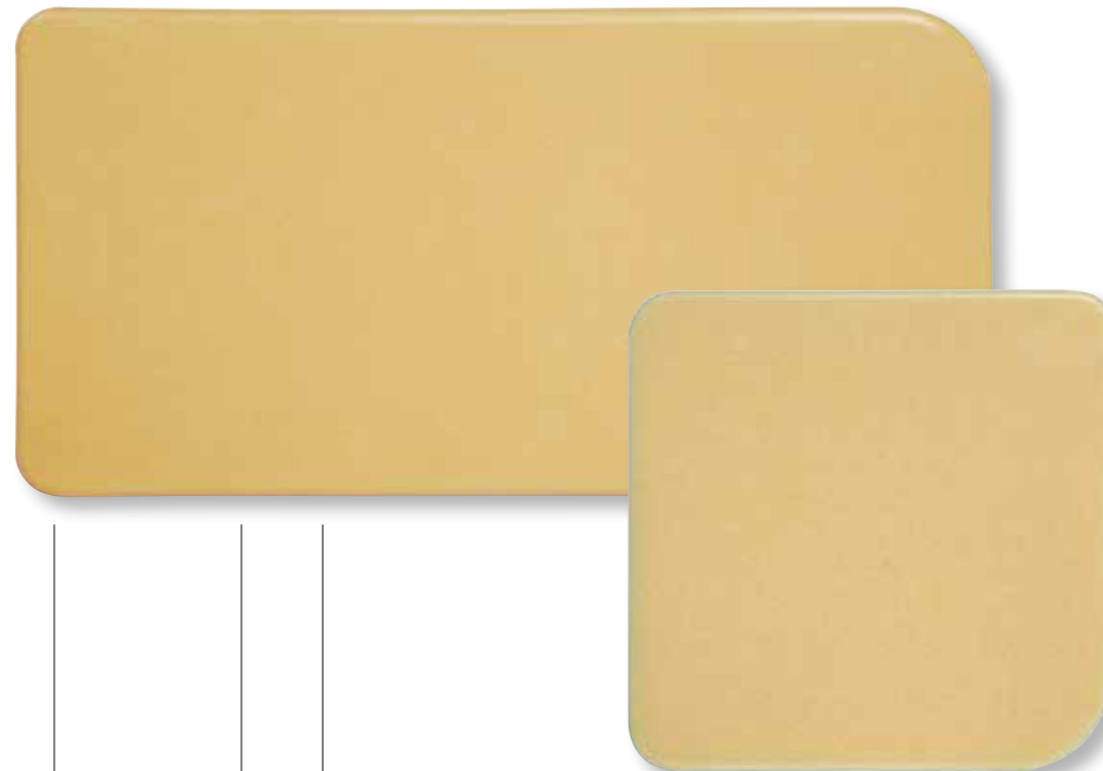

1.
Schnelle und lang anhaltende Aufnahme von Feuchtigkeit bis zu 72 Stunden⁴⁾

3.
Anmodellierbar für optimalen Schutz vor Leckagen

4.
Schmerzfrei und ohne Rückstände entfernbar

6.
Kosteneffizient durch lange Verweildauer

2.
Beidseitig haftend (gegebenenfalls mit Sekundärverband verwenden)

5.
Individuell zuschneidbar (vor Ablösen des Schutzpapiers)

Maximaler Schutz vor Unterwanderung, Irritation und Mazeration

Abdichtung und Schutz der Wundumgebung für die Unterdrucktherapie (V.A.C.®)

Eakin Cohesive® beidseitig haftende Hautschutzplatten sorgen für einen hocheffektiven abdichtenden Schutz der Wundumgebungshaut während der Unterdrucktherapie (V.A.C.®-Therapie).



Großflächig und flexibel

Durch das Anmodellieren des Eakin Cohesive® Hautschutzes um die Wunde herum kann die Haut vor Unterwanderung und Leckagen geschützt werden. Bei größeren Wunden lässt sich mit den Eakin-Cohesive®-Hautschutzplatten ein Schutz für die wundumgebende Haut herstellen. Cohesive® unterstützt einen atraumatischen Versorgungswechsel.

