

Eakin Produkte für den Hautschutz um eine Fistel

Diese Fallstudie untersucht die Verwendung von Eakin Produkten, um einen Hautschutz bei einer Fistel herzustellen.

Von Des Davies, klinischer Pflegeberater im SCGH-Krankenhaus Perth, WA, Australien

Krankengeschichte

- 68-jähriger Mann
- Wohnt mit Ehefrau zuhause
- Lebt im ländlichen Westaustralien
- Komplexe Anamnese und chirurgische Vorgeschichte
- 2015 subtotale Kolektomie, Splenektomie, partielle Gastrektomie nach einem geringgradigen Adenokarzinom bei linker Dickdarmflexur - Entstehung einer Ileostomie
- Umkehrung der doppeläufigen Ileostomie am 12.02.15
- Postoperativ- Anastomoseninsuffizienz - Revisions-Laparotomie & Ausspülung & Revisions- Ileo-Rektal- Anastomose.
- Wundstörung – Ausspülung und neue enterokutane Fistel mit abdominaler Ansammlung 13.02.15
- Patient entgegen ärztlichen Rat am 16.02.15 entlassen
- Patient am 20.02.15 erneut eingeliefert
- Patient ins SCGH-Krankenhaus verlegt

Falldetails

Entnommener Wundabstrich, 3M Barrier Wipe, Eakin Cohesive Slim Hautschutzring für die obere und rechte Fistel sowie eine zu einer Wurstform gerollter Hautschutzring von Eakin, aufgetragen auf den Rand der großen Fistel.

Die obere Fistel ist abgeheilt, jedoch hat sich unter der großen Fistel eine weitere kleine Fistel entwickelt. Eakin Hautschutzringe wurden rund um die große Fistel eingesetzt, da die Ränder anfangen, sich nach innen zu rollen, ein Eakin Fistelbeutel wurde aufgelegt. Für die untere Fistel wurde ein Eakin Slim Hautschutzring und der ovale Fistelbeutel von Eakin verwendet.

Untersuchungen

- Thoraxröntgenbild
- Abdomen-CT
- Blutbild
- Abstriche aus Wunden & Fistel
- MSU
- Rektumtumor diagnostiziert
- Patientenmanagement der Krankheiten
- Einlieferung auf die Intensivstation/ Intensivüberwachungspflege
- NSTEMI
- GI-Blutung
- Akute Cholezystitis
- SVT/AF vermutlich nahe Sepsis
- Harnwegsinfekt
- Totale parenterale Ernährung 6 Monate lang



Monate später: Verheilte Hautumgebung der Fistel mittels Eakin Hautschutzringen um die große Fistel und Eakin Slim Hautschutzring auf die anderen beiden Fisteln mit Fistelbeutel – Fistelbeutel konnten 7 Tage lang belassen werden.



Haut in ausgezeichneter Verfassung – Ärzte, Stomaschwester und Patient sehr zufrieden.

Große Fistel mit Eakin Fistelbeutel versorgt. Untere Fistel mit Eakin Hautschutzring und Wundbeutel versorgt. Rechte Fistel abgeheilt.

Große Fistel: Eakin Hautschutzring, da sich die Fistel in einer tiefen Senke befindet. Beutel verwendet. Untere Fistel mit Eakin Slim Hautschutzring und Eakin Fistelbeutel versorgt. Rechte Fistel ist abgeheilt. Jedoch trat bei dem Patient eine Ansammlung auf – Drainagekatheter eingesetzt.



Durch den Drainagekatheter oben heilte die rechte Fistel. Leckage an Drainagegestelle. Eakin Paste und Eakin Slim Hautschutzring wurden als Hautschutz verwendet. Fistelbeutel wurde aufgelegt, Drainagekatheter wurde in Beutel platziert, Beutel wurde eingeschnitten, damit Drainagekatheter nach außen gezogen wird, Fistelbeutel mit Opsite verschlossen, um Leckage zu verhindern. Drainagekatheter an Statlock Stabilisierungsvorrichtung befestigt. Schaumstoffverband unter 3-Wege-Hahn angebracht, um Druckstellen zu verhindern.

Fistelsekretion reduziert, es war möglich, Eakin Slim Seal für beide Fisteln zu verwenden, sowie den Eakin Beutel.

