

# Eakin Release™ alkoholfreier Pflasterentferner

Die hautschonende und schmerzfreie Lösung  
zur Entfernung von Pflaster- und Kleberesten

## Vorteile:

- Brennt nicht auf der Haut – ermöglicht eine schmerzfreie Entfernung des Beutels bzw. der Basisplatte. Mit dem zusätzlichen Vitamin-E-Gehalt unterstützt Release™ die Hautregeneration.
- Beim Auftragen auf die Haut trocknet Release™ innerhalb von Sekunden, ohne die Haut auszutrocknen.
- duftet nach frischer Minze und hilft somit, unangenehme Gerüche zu kaschieren
- beugt Hautirritationen vor
- verschmiert Klebereste nicht



Duftet frisch nach Minze



## Einfache Anwendung:



Für eine schmerzfreie Beutelentfernung sprühen Sie Release™ um die Hautschutzränder herum und warten ein paar Sekunden. Das Aerosol kann aus jedem Winkel gesprüht werden.

Lösen Sie langsam den Hautschutz und sprühen Sie nochmals Release™ wenn nötig.

Beim Auftragen auf die Haut trocknet Release™ innerhalb von Sekunden. Die Haftwirkung der nächsten Versorgung bleibt erhalten.



### Sprüht auch kopfüber!

Das Aerosol kann aus jedem Winkel gesprüht werden und ist sehr sparsam im Verbrauch.



## Eakin Release™ Pflasterentferner

Beschreibung	Packungsinhalt	Art.-Nr.	PZN	HMV
Spray	1x 50 ml	839023	07532102	29.26.10.4026
Tücher	30	839024	09709013	29.26.10.4025

Seit der Einführung des Eakin-Produkts Release™ im Jahre 2010 hat T.G. Eakin Ltd. keine bestätigten Berichte über Hautreaktionen erhalten, weder bei den Aerosolen noch bei den Tüchern. Trotz der positiven Rückmeldungen bei Verwendung von Release™ in der Behandlung von pädiatrischen Stomata, empfehlen wir Patch-Tests vor der Verwendung des Produkts bei Kindern. Gemäß den klinischen Leitlinien zur Funktion der unreifen Hautbarriere bei Frühgeborenen rät der Hersteller T.G. Eakin Ltd. von der Verwendung von Release™ bei Frühgeborenen mit Stomata ab.

Alle Informationen dieses Eakin-Flyers beruhen auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für aktuell und korrekt gehalten werden. Eine Gewähr auf die Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Art von Schäden, die sich aus der Nutzung der hier publizierten Informationen ergeben könnten. Sollten Sie sich für die Verwendung von in diesem Prospekt aufgeführten Medizinprodukten entscheiden, beachten Sie bitte vor deren Anwendung auch die jeweilige Gebrauchsinformation.

### Beratung:

 **0800-22 440 22**  
(gebührenfrei)

### Bestellungen:

 **0800-22 440 221**  
(gebührenfrei)

Eakin GmbH  
FeringasträÙe 6  
85774 Unterföhring

Tel. 089-99 216 256  
Fax 0800-22 440 220  
info@eakin.de · www.eakin.de