

1

z. B. bei nässenden Hautzuständen

Nachhaltige Feuchtigkeitsaufnahme sowie hochresistente Abdichtung¹⁾

Eakin Cohesive® nimmt maximal und kontinuierlich Feuchtigkeit auf. Eakin Cohesive® dichtet optimal ab und sorgt dafür, dass Feuchtigkeit nicht mit der Haut in Berührung kommt. Ein entscheidender Faktor, um Hautentzündungen zu vermeiden.

2

z. B. bei aggressiven Ausscheidungen

Reduziert die Enzymaktivität auf der Haut¹⁾

Eakin Cohesive® bildet eine hautprotektive Gelphase und reduziert so die digestive Aktivität gewebeabbauender Stoffe. So kann verhindert werden, dass aggressive Ausscheidungen wie Fäkal-Enzyme oder chemische Irritantien die Haut angreifen oder verändern können. Diese spezielle Gelbildung schützt empfindliche Hautstrukturen und ermöglicht darüber hinaus einen atraumatischen Versorgungswechsel.

3

z. B. bei geschädigter Haut

Bakterienhemmende Eigenschaften¹⁾

Die Eakin-Cohesive®-Hautschutzformulierung wirkt gegen das Wachstum von Bakterien, indem sie den pH-Wert der Haut schonend reguliert.

Eakin Cohesive® Hautschutzpaste oftmals medizinisch notwendig:

- bei Hautunebenheiten, z. B. bei Narben
- bei Hautschäden, z. B. in der Post-OP-Phase (auch bei Läsionen)
- bei peristomalen Druckgeschwüren
- bei schwer zu versorgenden Stellen, z. B. zur Füllung und Abdichtung in Falten
- bei problematischer Haut, z. B. Kinder- oder Altershaut
- zum Schutz der Wundumgebung



Eakin Cohesive® Hautschutzpaste

Beschreibung	Tube	
Packungsinhalt	20g	60g
Art.-Nr.	SP839010	839010
PZN	06575256	05493131
HMV	29.26.10.0028	29.26.10.0027

Videoberatung unter www.eakin.de



Alle Informationen dieses Folders beruhen auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für aktuell und korrekt gehalten werden. Eine Gewähr auf die Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Art von Schäden, die sich aus der Nutzung der hier publizierten Informationen ergeben könnten. Sollten Sie sich für die Verwendung von in diesem Prospekt aufgeführten Medizinprodukten entscheiden, beachten Sie bitte vor deren Anwendung auch die jeweilige Gebrauchsinformation.

Der schnelle Weg zu Ihrem Gratismuster online und mobil:

Ihr Eakin®-Musterportal

Einfach mobil unter

<https://professionals.eakin.de>

anfordern oder über diesen QR-Code:



Beratung:

0800-22 440 22
(gebührenfrei)

Bestellungen:

0800-22 440 221
(gebührenfrei)

Eakin GmbH, Feringastrasse 6, 85774 Unterföhring
Tel. 089-99 216 256, Fax 0800-22 440 220, info@eakin.de, www.eakin.de

Eakin Cohesive® alkoholfreie Hautschutzpaste




Fistel

Wunde

Stoma

Effektiver Hautschutz für die Stoma-, Fistel- und Wundversorgung

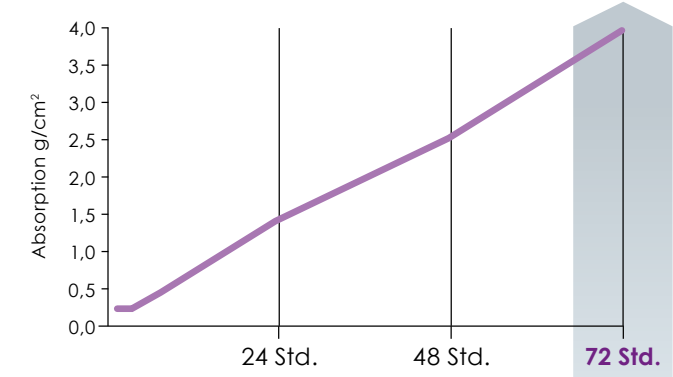

Eakin-Cohesive®-Hautschutz nimmt bis zu 72 Stunden kontinuierlich Feuchtigkeit auf.



Eakin-Cohesive®-Hautschutzpaste dichtet optimal ab und sorgt dafür, dass aggressive Ausscheidungen nicht mit der Haut in Berührung kommen.

Fallbeispiele, die für die Cohesive®-Hautschutzpaste sprechen:

Fistel

Eakin-Cohesive®-Hautschutzpaste im Fistelmanagement²⁾

Fistelsituation:

Patient leidet an einer stark ausgeprägten Fistel mit bereits perforiertem Divertikel und sehr starker Exsudation.

Lösung:

Entlang der Wundnaht und in den Hautfalten wurde Eakin-Cohesive®-Hautschutzpaste als Füllelement eingesetzt. Um den Schutz der Wundumgebung und den Heilungsprozess der irritierten Haut zusätzlich zu unterstützen, wurde ein großer Eakin-Cohesive®-Hautschutzring um die Fistel herum appliziert. Die Fistel konnte so gut versorgt werden.²⁾



Wunde

Eakin-Cohesive®-Hautschutzpaste im Wundmanagement²⁾

Wundsituation:

Patient leidet an einer Wunde mit enteroatmosphärischer Fistel. Eine Vakuumtherapie verlief erfolglos.

Lösung:

Mit einer Kombination aus Eakin® Wund- und Fistelbeuteln, Eakin-Cohesive®-Hautschutzplatten und Eakin-Cohesive®-Hautschutzpaste konnte diese Wundsituation beherrscht werden.²⁾



Stoma

Eakin-Cohesive®-Hautschutzpaste im Stomamanagement²⁾

Stomasituation:

Ein Ileostoma wurde nahe an der Bauchmitte angelegt. Das führte zur Ausbildung einer Bauchfalte, was es schwierig machte, die Stomaversorgung dicht anzubringen.


Lösung:

Eakin-Cohesive®-Hautschutzpaste wurde als Füllmaterial für die Bauchfalte verwendet. Mit der zusätzlichen Verwendung eines Eakin-Cohesive-SLIMS®-Hautschutzrings als erweiterter Hautschutz konnte ein normaler Beutelwechsel gewährleistet werden.²⁾



Zuverlässiger Hautschutz für Stomapatienten


Einfach nach Bedarf direkt auf die Haut auftragen und mit den angefeuchteten Fingern verteilen.

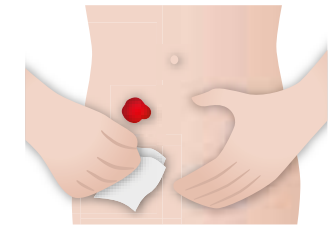


Reinigen und trocknen Sie die Haut um das Stoma herum, sodass sie sauber und fettfrei ist.



Geben Sie die Paste direkt von der Tube auf Hautfalten, Narben oder unebene Hautoberflächen.

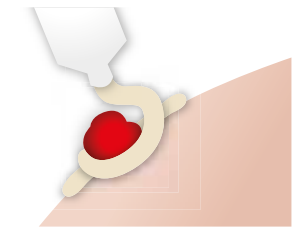

Tragen Sie die Paste unmittelbar um das Stoma herum auf.

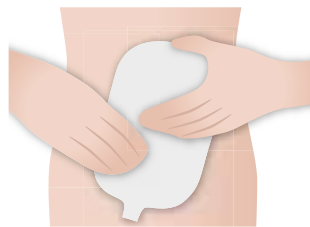

Legen Sie den Beutel bzw. die Basisplatte in die gewünschte Position und halten Sie diesen für etwa 30 Sekunden gedrückt.

Quellen:

- 1) Mc Groggan G., Haughey S. und McDowell K. (2018): An absorbent, enzyme-inhibiting seal reduces peristomal skin complications. *Gastrointestinal Nursing* 16:1, 42-4.
- 2) Data on File Eakin Ltd.
- 3) Data on file: "Effect over seven days on fungal growth", Dr. Grace McGroggan, TG Eakin Ltd, Northern Ireland (2012).
- 4) McGroggan, G.: Effects of a hydrocolloid ostomy seal on fecal enzyme activity and moisture absorption. Poster presented at 3rd Congress of the World Union of Wound Healing Societies June 4-8, 2008; Toronto, Canada.
- 5) Data on file: "Effect of a long life ostomy seal on faecal enzyme activity", Dr. Grace McGroggan, TG Eakin Ltd, Dr. Lorraine Martin, Queen's University Belfast, Northern Ireland (2014).

Die Eakin-Cohesive®-Hautschutzpaste kann auch zusammen mit den Eakin®-Hautschutzringen, den Stoma- sowie den Fistel- und Wundbeuteln für optimale Sicherheit und Abdichtung verwendet werden.