



**Eakin Cohesive
StomaWrap™**

**Vielseitig anwendbar
als Hautschuttring oder
Modellierstreifen**

Die FORM, die ideal passt:



erweiterter Hautschutz
für alle Stomaarten



ovale Stomata



große Stomata



doppelläufige Stomata
mit Steg/Reiter



pilzförmige Stomata,
z.B. bei Stomaödem, Prolaps



Urostomien



Stomapatienten mit einge-
schränkter Fingerfertigkeit



für sportlich Aktive oder
bei starker Schweißbildung

Cohesive StomaWrap™

Der Cohesive StomaWrap™ schützt die Haut um das Stoma herum und reduziert das Risiko von Leckagen.

StomaWrap™ bietet Ihnen mehr Sicherheit und Sie können Ihre Versorgung oftmals länger tragen.


VIELSEITIG ANWENDBAR
als Modellierstreifen
oder Hautschutzring

VARIO-ÖFFNUNG:
EINFACH
ÜBERLAPPEND
ANMODELLIEREN

Ermöglicht einen **schnellen Versorgungswechsel** und erleichtert Patienten die Handhabung.

DER HAUTSCHUTZ, DER
EIN SCHUTZGEL BILDET¹⁾

Eakin Cohesive® bildet eine aktive Gelphase und senkt so die digestive Aktivität gewebeabbauender Stoffe. Zusätzlich werden empfindliche Hautstrukturen geschützt und ein schmerzfreier Versorgungswechsel ermöglicht.

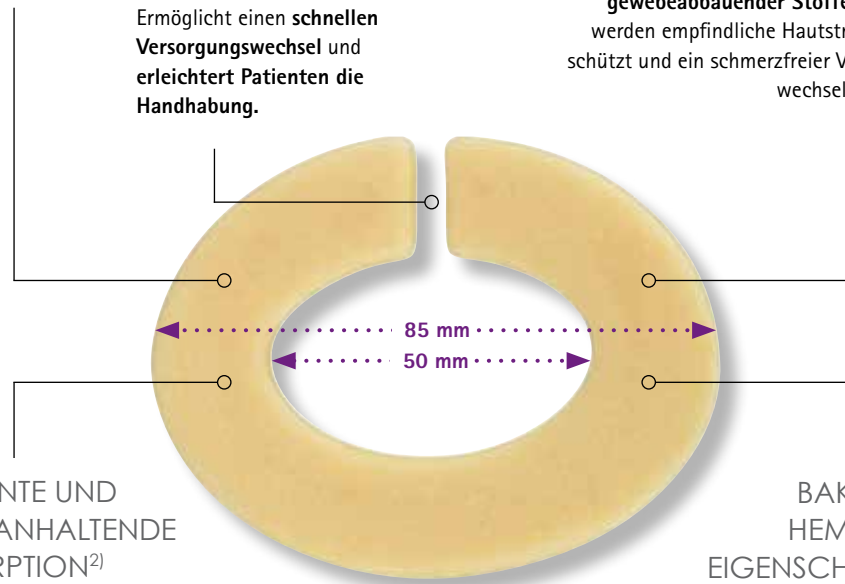

EFFIZIENTE UND LANGANHALTENDE ABSORPTION²⁾

Eakin Cohesive® nimmt über die Tragezeit kontinuierlich Feuchtigkeit auf. Eakin Cohesive® dichtet ideal ab und hält Feuchtigkeit von der Haut fern. Ein entscheidender Faktor, um Hautentzündungen zu vermeiden.

BAKTERIENHEMMENDE EIGENSCHAFTEN¹⁾

Die Eakin Cohesive® Hautschutzformulierung wirkt gegen das Wachstum von Bakterien, indem sie den pH-Wert der Haut schonend reguliert. So kann nachhaltig verhindert werden, dass die Haut mikrobiell angegriffen wird.

EINFACH anzuwenden:



Stellen Sie sicher, dass die Haut rund um das Stoma sauber, trocken und frei von Fett und Cremes ist.



Das Wrap haftet auf beiden Seiten und verliert seine Haftfähigkeit auch nicht, wenn Sie es mehrmals neu positionieren.



Wickeln Sie Cohesive StomaWrap™ einfach um das Stoma herum und lassen die Enden überlappen, um eine sichere Abdichtung zu schaffen.



Achten Sie darauf, dass keine Hautstellen direkt um das Stoma herum unbedeckt bleiben.



Danach legen Sie den Stomabeutel bzw. die Basisplatte an.

1) Data on file: "Effect of a long life ostomy seal on faecal enzyme activity", Dr. Grace McGroggan, TG Eakin Ltd, Dr. Lorraine Martin, Queen's University Belfast, Northern Ireland (2014)

2) McGroggan, G.: Effects of a hydrocolloid ostomy seal on fecal enzyme activity and moisture absorption. Poster presented at 3rd Congress of the World Union of Wound Healing Societies June 4-8, 2008; Toronto, Canada



Anwendungsvideo:
www.eakin.eu/new-how-to-apply-eakin-cohesive-stomawrap

FREUEN SIE SICH ÜBER GESUNDE HAUT RUND UM IHR STOMA







Cohesive StomaWrap™

Die einzigartige Form sorgt dafür, dass sich StomaWrap™ schnell und einfach anbringen lässt. Er muss nicht durch Anwärmen, Dehnen oder Reißen auf die richtige Größe gebracht werden.

Legen Sie das Cohesive StomaWrap™ einfach rund um Ihr Stoma, überlappen die Enden und schaffen so den gewünschten Schutz.

STOMATA SIND VIELFÄLTIG – UNSERE LÖSUNGEN AUCH

Sehr flexibel	Höchster Schutz	Grossflächig	Innovativ und variabel
			
Eakin Cohesive SLIMS® modellierbare Hautschutzringe, dünn	Eakin Cohesive® modellierbare Hautschutzringe, klein	Eakin Cohesive® modellierbare Hautschutzringe, groß	Eakin Cohesive StomaWrap™ mit Vario-Öffnung
Cohesive®-Stärke 3,0 mm	Cohesive®-Stärke 4,2 mm	Cohesive®-Stärke 2,1 mm	Cohesive®-Stärke 3,1 mm
Durchmesser 48 mm/ 19 mm (innen)	Durchmesser 48 mm/ 19 mm (innen)	Durchmesser 98 mm/ 19 mm (innen)	Durchmesser 85 mm/ 50 mm (innen)
Art.-Nr. 839005	Art.-Nr. 839002	Art.-Nr. 839001	Art.-Nr. 839006
Packung à 10 Stück	Packung à 30 Stück	Packung à 10 Stück	Packung à 10 Stück
HMV-Nr. 29.26.11.2031	HMV-Nr. 29.26.11.2039	HMV-Nr. 29.26.11.2039	HMV-Nr. 29.26.11.2032
PZN 10126966	PZN 10280957	PZN 10280963	PZN 10770621

Alle Informationen dieses Eakin-Folders beruhen auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für aktuell und korrekt gehalten werden. Eine Gewähr auf die Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Art von Schäden, die sich aus der Nutzung der hier publizierten Informationen ergeben könnten. Sollten Sie sich für die Verwendung von in diesem Prospekt aufgeführten Medizinprodukten entscheiden, beachten Sie bitte vor deren Anwendung auch die jeweilige Gebrauchsinformation.

Beratung:

 **0800-22 440 22**
(gebührenfrei)

Bestellungen:

 **0800-22 440 221**
(gebührenfrei)

Eakin GmbH
FeringasträÙe 6
85774 Unterföhring

Tel. 089-99 216 256
Fax 089-99 950 957
info@eakin.de · www.eakin.de