

# Die 2-TEILER- INNOVATION von Eakin.

Auch  
ausschneidbar  
bis 50 mm!



**Die bis 50 mm ausschneidbare Basisplatte ist ideal als Erstversorgung nach der OP-Phase und bei doppel-läufigen Ileostomien.**

Damit Sie Eakin dot® noch breiter einsetzen können, steht Ihnen nun zusätzlich eine Variante für Stomata bis 50 mm zur Verfügung. Sie können zwischen ausschneidbaren und vorgestanzten Basisplatten wählen.

Beutel und Platten haben einen Rastring mit 80 mm Durchmesser. Eine praktische grüne Farbcodierung auf den Packungen lässt diesen sofort erkennen, während der 60-mm-Rastring gelb gekennzeichnet ist.


# Der ausziehbare violette Rastring

Untergreifbarer Rastring, Anbringen des Beutels ohne Druck auf die Bauchdecke auszuüben.

→ **Ideal bei empfindlichen Patienten**

Versenkbarer Rastring für diskretes Profil. Kein Auftragen unter der Kleidung.

→ **Besonders geeignet für aktive Patienten (Freizeit und Beruf)**

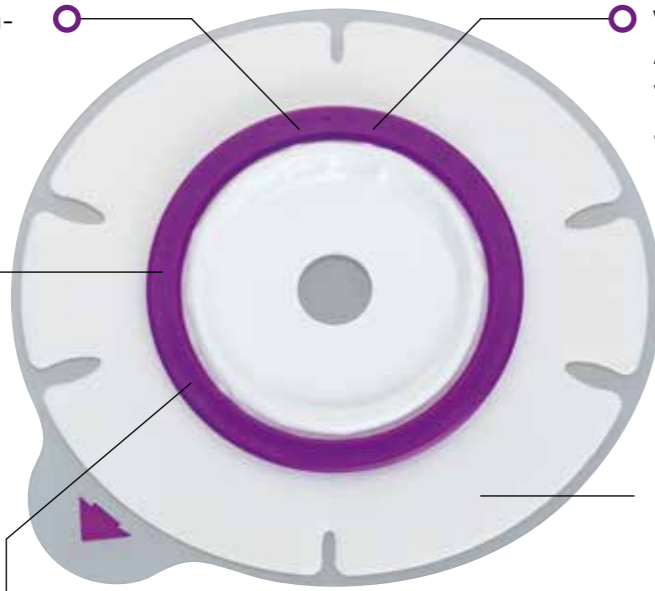

Stabiler Rastring verhindert ein Abknicken beim Bücken oder Sitzen. Hörbares Einrasten, kein versehentliches Lösen des Beutels.

→ **Besonders sicher für Patienten mit Hernien oder überhängenden Bauchdecken**

Visuelle Kontrolle beim Anbringen des Beutels durch violetten Rastring.

→ **Ideal zum schnellen Anlernen neuer Patienten**

→ **Besonders geeignet bei temporären Stomata**

→ **Erleichterung für manuell oder visuell eingeschränkte Patienten**

Die weiße Schaumstoffseite ist hygienisch zu reinigen, auch Duschen ist damit möglich.

→ **Besonders geeignet bei längerer Tragezeit**

## skinsmart™ – neue Entwicklung aus der Eakin®-Hautschuttforschung



Maximale Tragezeit und Hautverträglichkeit

→ **Für erhöhte Wirtschaftlichkeit**

→ **Besonders geeignet bei Patienten mit empfindlicher Haut**



Soforthaftung auf der Haut, kein Anwärmen oder Andrücken nötig.

→ **Besonders geeignet bei berufstätigen, aktiv im Leben stehenden Patienten und Sportlern**

→ **Besonders geeignet bei pflegebedürftigen Patienten**



Hochflexible, leicht ovale Blütenform. Passt sich jeder Körperkontur an.

→ **Besonders geeignet für Patienten mit parastomalen Hernien oder überhängender Bauchdecke**

# Vorteile der Eakin®-dot-Stomabeutel

## Vliesumhüllung

Die weiche beidseitige wasserabweisende Vliesumhüllung bietet zusätzlichen Tragekomfort. Das geteilte Vlies erlaubt eine problemlose Inspektion des Beutels.

## Abziehflasche

Praktische Abziehflasche für kontrollierten Beutelwechsel.



## Filter

Der Filter innerhalb des Vliesfensters ermöglicht einen kontrollierten, neutralen Luftabgang.




## Kopplungssystem

doppelt sicher mit innerem Sicherheitsring und äußerem Verschlussring



## Gürtel

Optional kann an den Beuteln ein Gürtel befestigt werden.

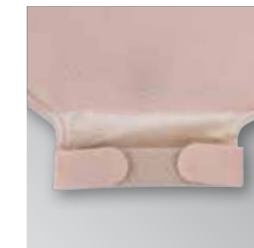

## Verschluss

Die Komfortlasche erleichtert Entleerung und Reinigung. Nach dem Entleeren einfach wieder hochfalten und fixieren.

# So bestellen Sie Eakin® dot

Alle Beutel haben eine beidseitige angenehme hautfarbene Vliesumhüllung mit Sichtfenster.  
Die Folie darunter ist transparent.



## Plane Basisplatten mit durchgehendem Hautschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rastring	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839800	Eakin® dot Basisplatte ausschneidbar 15-37,5 mm	60 mm	5	29.26.05.1092	11870460
839801	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 20 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870477
839802	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 22,5 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870514
839803	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 25 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870520
839804	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 27,5 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870537
839805	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 30 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870566
839806	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 32,5 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870572
839807	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 35 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870595
839808	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 37,5 mm	60 mm	5	29.26.05.1093	11870626
839809	Eakin® dot Basisplatte ausschneidbar 15-50 mm	80 mm	5	29.26.05.1101	15529338
839810	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 40 mm	80 mm	5	29.26.05.1100	15529321
839811	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 45 mm	80 mm	5	29.26.05.1100	15529315
839812	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 50 mm	80 mm	5	29.26.05.1100	15529309



## Kolostomiebeutel mit Filter und Gürtelhalterung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beutel- volumen	Rastring	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839900	Eakin® dot Kolostomiebeutel Mini	250 ml	60 mm	30	29.26.01.0079	11870224
839901	Eakin® dot Kolostomiebeutel Standard	440 ml	60 mm	30	29.26.01.0080	11870247
839902	Eakin® dot Kolostomiebeutel Maxi	560 ml	60 mm	30	29.26.01.0078	11870282
839920	Eakin® dot Kolostomiebeutel Standard	440 ml	80 mm	30	29.26.01.0084	15529290
839921	Eakin® dot Kolostomiebeutel Maxi	560 ml	80 mm	30	29.26.01.0085	15529284



## Ausstreifbeutel mit Filter und Gürtelhalterung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beutel- volumen	Rastring	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839903	Eakin® dot Ausstreifbeutel Mini	330 ml	60 mm	30	29.26.02.0097	11870336
839904	Eakin® dot Ausstreifbeutel Standard	410 ml	60 mm	30	29.26.02.0098	11870365
839905	Eakin® dot Ausstreifbeutel Maxi	620 ml	60 mm	30	29.26.02.0096	11870394
839922	Eakin® dot Ausstreifbeutel Standard	410 ml	80 mm	30	29.26.02.0103	15529278
839923	Eakin® dot Ausstreifbeutel Maxi	620 ml	80 mm	30	29.26.02.0104	15529261



## Eakin® Gürtel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839520	Eakin® Gürtel, stufenlos verstellbar, 50 – 160 cm	1	29.26.11.0024	05494426

Alle Informationen dieses Eakin-Folders beruhen auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für aktuell und korrekt gehalten werden. Eine Gewähr auf die Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Art von Schäden, die sich aus der Nutzung der hier publizierten Informationen ergeben könnten. Sollten Sie sich für die Verwendung von in diesem Prospekt aufgeführten Medizinprodukten entscheiden, beachten Sie bitte vor deren Anwendung auch die jeweilige Gebrauchsinformation.

### Beratung:

Tel. 0800-22 440 22  
(gebührenfrei)  
info@eakin.de

### Bestellungen:

Tel. 0800-22 440 221 (gebührenfrei)  
Fax 0800-22 440 220  
bestellung@eakin.de

### Eakin GmbH

FeringasträÙe 6  
85774 Unterföhring  
www.eakin.de



Ihr Eakin®-Musterportal  
Kostenlos und schnell!  
<https://professionals.eakin.de>

