

Einfaches Anbringen und Entfernen von Eakin® dot

Zum Anbringen




Aus **klapp!**en

Nach dem Anbringen der Basisplatte ziehen Sie mit Ihren Fingern den violetten Rastring heraus.



An **klick!**en

Platzieren Sie den Beutel auf den violetten Rastring der Basisplatte und untergreifen Sie diesen, so können Sie den Beutel rundherum festdrücken. Dann hören Sie ein deutliches Klicken. Anschließend kann der Rastring versenkt werden.

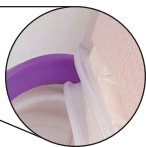

Innerer Verschlussring am Beutel

Zum Entfernen

Wichtig: Beutel nach **vorne knick!**en bis der innere Verschlussring am Beutel sich aus dem violetten Rastring hebt. Dann einfach nach unten abziehen.



So bestellen Sie Eakin® dot



Basisplatten mit durchgehendem Hautschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839800	Eakin® dot Basisplatte ausschneidbar 15-37,5 mm	5	29.26.05.1092	11870460
839801	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 20 mm	5	29.26.05.1093	11870477
839802	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 22,5 mm	5	29.26.05.1093	11870514
839803	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 25 mm	5	29.26.05.1093	11870520
839804	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 27,5 mm	5	29.26.05.1093	11870537
839805	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 30 mm	5	29.26.05.1093	11870566
839806	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 32,5 mm	5	29.26.05.1093	11870572
839807	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 35 mm	5	29.26.05.1093	11870595
839808	Eakin® dot Basisplatte vorgestanzt 37,5 mm	5	29.26.05.1093	11870626



Kolostomiebeutel mit Filter und Gürtelhalterung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beutel- volumen	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839900	Eakin® dot Kolostomiebeutel Mini	250 ml	30	29.26.01.0079	11870224
839901	Eakin® dot Kolostomiebeutel Standard	440 ml	30	29.26.01.0080	11870247
839902	Eakin® dot Kolostomiebeutel Maxi	560 ml	30	29.26.01.0078	11870282



Ausstreifbeutel mit Filter und Gürtelhalterung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beutel- volumen	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839903	Eakin® dot Ausstreifbeutel Mini	330 ml	30	29.26.02.0097	11870336
839904	Eakin® dot Ausstreifbeutel Standard	410 ml	30	29.26.02.0098	11870365
839905	Eakin® dot Ausstreifbeutel Maxi	620 ml	30	29.26.02.0096	11870394



Eakin® Gürtel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Packungs- inhalt	HMV	PZN
839520	Eakin® Gürtel für konvexe Beutel, stufenlos verstellbar, 50 - 160 cm	1	29.26.11.0024	05494426

Die Rastringgröße ist bei allen Produkten einheitlich 60 mm.

Alle Beutel haben eine beidseitige angenehme hautfarbene Vliesumhüllung mit Sichtfenster.

Die Folie darunter ist transparent.

Fragen, Muster, Bestellungen: 0800-22 440 22 (gebührenfrei)