

eakin® ™



Surround™
SKIN PROTECTOR

Surround™ Hautschutzpad

zur Fixierung von Sonden, Kathetern und Drainagen

Das neue Surround™ Hautschutzpad von Eakin® vereint idealen Hautschutz und eine zuverlässige Fixierung von Sonden, Kathetern und Drainagen. Die Oberfläche des Pads ist wasserdicht und bildet eine Barriere gegen Bakterien.

Basierend auf denselben Prinzipien wie bei den Eakin® **Cohesive**® Produkten bietet die einzigartige Hautschutzformulierung einen **3-fach-Wirkmechanismus**:

- 1) **Absorbiert Feuchtigkeit** und sorgt dafür, dass sie nicht mit der Haut in Berührung kommt
- 2) **Reduziert digestive Enzym-Aktivität** und verhindert somit eine Veränderung der Haut
- 3) **Erhält den natürlichen pH-Gehalt** der Haut und verhindert, dass biologische und chemische Interaktionen in Kontakt mit der Haut auftreten können

VORTEILE

- Reduziert Hautirritationen
- Bietet zuverlässigen Hautschutz
- Erhöht Komfort für Patienten
- Absorbiert auslaufende Flüssigkeiten
- Unterstützt den Heilungsprozess irritierter Haut
- Einfach in der Anwendung, sehr flexibel
- Hinterlässt keine Rückstände wie bei klassischen Pflastern möglich
- Erleichtert die Pflege und reduziert den Zeitaufwand

EINSATZBEREICHE

Das Surround™ Hautschutzpad von Eakin® lässt sich bei vielerlei Anwendungen effektiv einsetzen, so zum Beispiel für

- PEG Sonden
- Katheter
- Tracheostomie-Kanülen
- Drainageschläuche

EINFACH IN DER HANDHABUNG

Das Surround™ Hautschutzpad lässt sich in 4 einfachen Schritten anbringen:



Umgebenden Bereich reinigen und trocknen



Schutzpapier vom Pad abziehen



Hautschutzpad mit den beiden Enden überlappend anbringen, um eine noch bessere Versiegelung zu erreichen



Die Ränder des Pads für optimalen Halt leicht andrücken

Fallbeispiel: Einsatz bei einer PEG Sonde




Vor der Verwendung des Surround™ Hautschutzpads – die Haut ist wund und schmerzt



Das Surround™ Hautschutzpad bedeckt den betroffenen Bereich und schützt die Haut

BESTELLINFORMATION

Eakin® **Surround™** Hautschutzpad
Packung zu 20 Stück (Durchmesser 58 mm)
Artikel-Nr.: 839012
PZN: 6561509

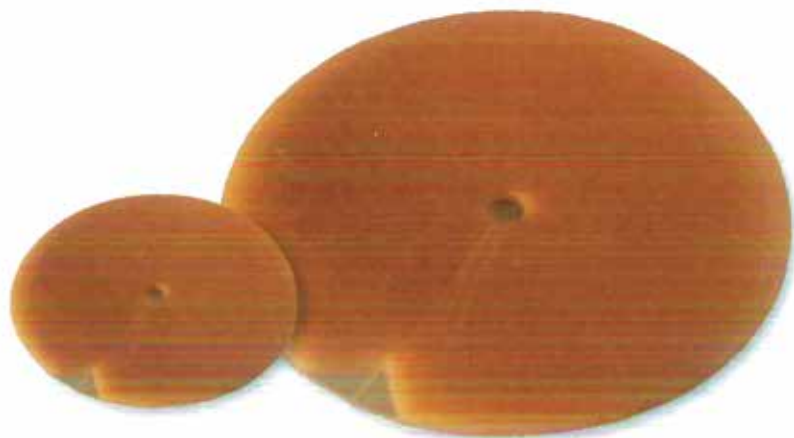

eakin® 

eakin® 

Weil Hautschutz wichtig ist.

Eakin GmbH · Feringastr. 6 · 85774 München-Unterföhring
Tel. 089 - 99 216 256 · Fax 089 - 99 216 200
info@eakin.de · www.eakin.de

Beratungshotline: 0800-2244022 (gebührenfrei)